



# 唾液検査キット使い方説明書

使い方が簡単な唾液による簡易薬物検査です  
約3分の検査時間で同時に6種類の薬物を検出できます

## ステップ 1

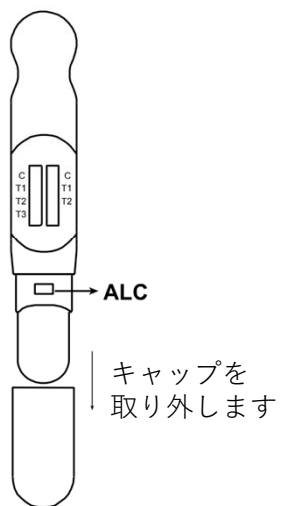


## ステップ 2

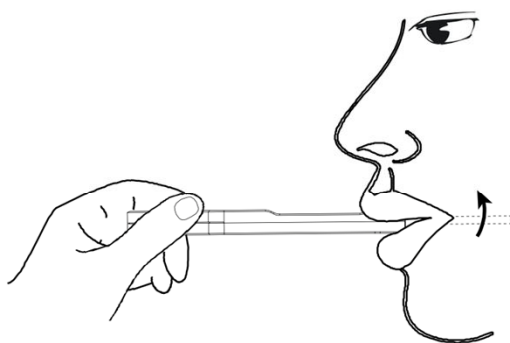


先端を口の中に入れ  
唾液を含ませます

## ステップ 3

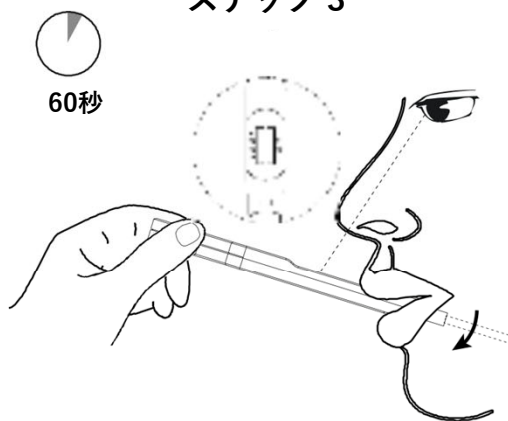

舌の下側に置き60秒  
待ちます

## ステップ 4

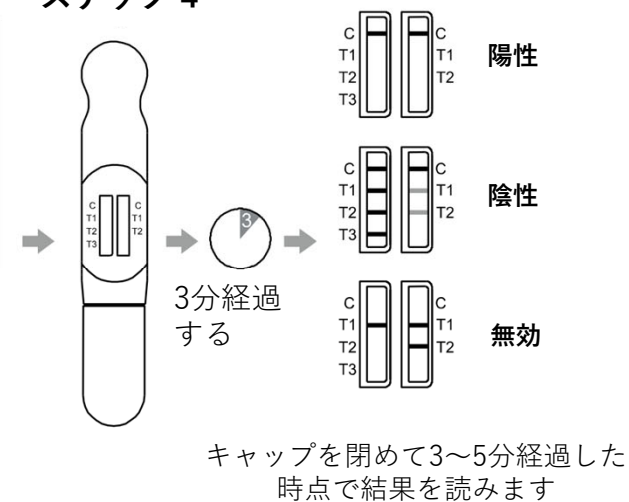

検出可能薬物：COC(コカイン)、AMP(アンフェタミン)  
BZO(ベンゾジアゼピン)、OPI(ヘロイン)  
MET(覚せい剤)、THC(大麻)、アルコール

Alcohol				
NORM.	ABNORM.			
NEG.	0.2 ‰ (0.02%)	0.4 ‰ (0.04%)	0.8 ‰ (0.08%)	3.0 ‰ (0.30%)